



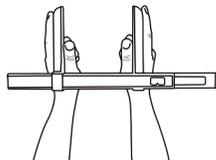

## INSTRUCCIONES DE USO:

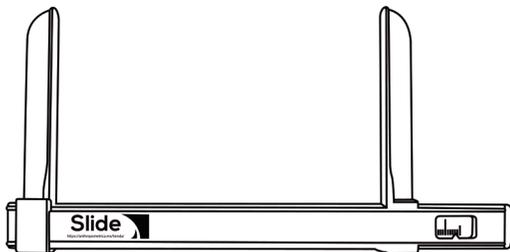


1. Descanse el antropómetro sobre la superficie dorsal de las manos.

2. Coloque los pulgares en la parte interior de las ramas.

3. Ubique los dedos índices de manera extendida en la parte exterior de las ramas.

4. Utilice los dedos medios para palpar los puntos de referencia donde se colocarán las ramas del antropómetro para realizar la medición.

5. Efectúe la lectura cuando el antropómetro se encuentre sobre los sitios anatómicos de referencia, manteniendo una presión constante de los dedos índices.

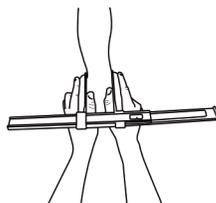

## ANTROPOMETRO SLIDE

**Rango de medición:** 1 – 20 cm

**Amplitud:** 203 mm

**Resolución:** 1 mm

**Material:** Plástico ABS

Ramas tipo "L".



Página web: <https://anthropometrica.mx/tienda/>

Correo: [ventas@anthropometrica.mx](mailto:ventas@anthropometrica.mx)

Whatsapp: +52 1 999 636 8486



### Precauciones:

- Evite exponer el equipo a altas temperaturas (agua caliente, fuego, vapor o aire caliente, por ejemplo: el interior de un auto expuesto a largos periodos bajo el sol).